

LA POSE DE L'ORTHÈSE – AIDE MÉMOIRE

1. Préparation initiale

Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise stable et fléchissez le genou à un angle de 45° (**Figure A**).



Figure A

Attachez les sangles sur elles-mêmes afin qu'elles ne vous dérangent pas lors de la pose (**Figure B**).



Figure B

2. Enlignement de EVOKE™

Enlignez le centre de l'articulation (**Figure C**) au centre des condyles de votre genou (**Figure D**).



Figure C



Figure D

3. Sangle #1

Attachez la sangle #1 tibiale postérieure proximale au-dessus du mollet. Elle permettra de maintenir l'orthèse en place (**Figure E**).



Figure E

4. Sangles #2 et #3

Attachez la sangle #2 tibiale antérieure, si présente (**Figure F**).



Figure F



Figure G

5. Sangles #4, #5 et #6

Attachez la sangle #4 fémorale postérieure proximale et la sangle #5 fémorale postérieure distale (**Figure H**).



Figure H

Attachez la sangle #6 fémorale antérieure, si présente (**Figure I**).



Figure I

6. Dernier ajustement

Afin de vérifier l'ajustement et le confort de votre **EVOKE™**, marchez ou faites quelques flexions.


Ajustez la tension des sangles au besoin.



* Il se peut que certaines de ces étapes ne s'appliquent pas à votre **EVOKE™**.



EVOKE™

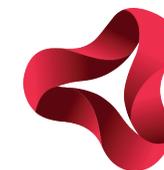

OssKin

Révolution en mouvement

www.osskin.com

UN MOT DE L'ÉQUIPE

Bienvenue dans la famille OssKin!

L'équipe d'OssKin s'est donné comme objectif de rendre le port de votre orthèse le plus agréable et confortable possible, tout en réduisant significativement votre douleur.

C'est après plus de 15 ans de R&D, d'importants brevets et d'innombrables tests cliniques que **EVOKE™** a vu le jour.

C'est pourquoi nous sommes fiers de vous offrir **EVOKE™**, l'orthèse la plus légère et la plus discrète au monde.

UNIQUE

Saviez-vous que votre orthèse **EVOKE™** a été fabriquée par un processus de fabrication d'impression 3D qui a été développé dans l'industrie aérospatiale ?

Le tout pour en faire un produit hautement sur mesure qui respecte parfaitement votre profil anatomique.

En travaillant avec cette haute technologie cela nous permet d'obtenir un maximum de complexité géométrique, tout en assurant un niveau supérieur de support et de confort et une précision imbattable.

Votre jambe et votre douleur sont uniques, nous voulons vous offrir un produit qui l'est également.

PRÉCAUTION

- ◆ Si vous ressentez des douleurs anormales, un changement de sensations ou des réactions inhabituelles en utilisant **EVOKE™**, contactez votre professionnel orthésiste ou consultez un médecin.

ARTICULATION

- ◆ Pour des raisons de sécurité l'articulation doit être démontée uniquement par votre professionnel orthésiste;
- ◆ Vérifiez régulièrement qu'aucun corps étranger ne s'est déposé dans l'articulation de votre **EVOKE™**;
- ◆ Nettoyez l'articulation à l'eau propre ou à l'air comprimé;
- ◆ Ne jamais huiler l'articulation. Si l'articulation ne fonctionne pas normalement, elle doit être réparée par votre professionnel orthésiste.

NETTOYAGE


- ◆ L'eau salée, le sable et toute saleté peuvent endommager votre produit. Rincez rigoureusement à l'eau propre après une exposition à ces conditions
- ◆ Lavez à la main avec un savon doux non détergent.
- ◆ Rincez soigneusement à l'eau froide et laissez sécher à l'air.

NOTE:

Entretenez régulièrement votre **EVOKE™** pour préserver l'état optimal du cadre, de l'articulation, des sangles et du coussinage.

TRUCS ET ASTUCES

- ◆ Appliquez votre **EVOKE™** directement sur la peau, un leggings ou un collant. Ne porter pas votre produit par-dessus un pantalon rigide.
- ◆ Lors d'activité sportive ou physique, le port d'un leggings ou d'une gaine est suggérée et doit être porté sous votre **EVOKE™**.
- ◆ Ne pas appliquer trop de tension sur les sangles fémorales #2 et #3.

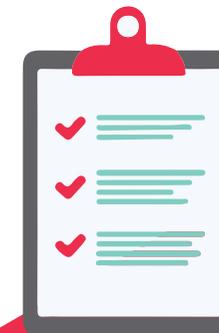

GARANTIE

Structure/Mécanisme	1 an
Coussinage	6 mois
Sangles	6 mois

Osskin garantit tous ses produits à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel et de fabrication. L'usure normale lors de l'utilisation n'est pas considérée comme un défaut. Si **EVOKE™** est modifié par une personne autre que votre professionnel orthésiste ou votre médecin, il perd sa garantie. Contactez votre professionnel orthésiste pour plus de détails.

